

EZ Cure™ – die resorbierbare Kollagenmembran

Umseitig finden Sie eine Auswahl unserer EZ Cure™ Membranen mit Preisangaben und Größen sowie unser Bestellformular: Einfach ausfüllen und an uns zurücksenden oder online bestellen!

Porcin, resorbierbar und 3-4 Monate lang stabil



Produkteigenschaften:

- Material: Schweinekollagen Typ I und III
- vollständig resorbierbar
- 3 verschiedene Größen erhältlich
- Stabile Barriere von 3 Monaten
- Steril verpackt
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- kontrollierter Herstellungsprozess nach international anerkannten Standards
- extrem formstabil
- gute Anpassung an den jeweiligen Defekt
- keine Volumenveränderung nach Benetzung

EZ Cure™ ist eine resorbierbare, quervernetzte (crosslinked) und dadurch extrem formstabile Kollagenmembran, die ihre strukturelle Integrität 3–4 Monaten aufrecht erhält. Trotz der hohen Formstabilität lässt sich die Membran einfach handhaben, ist zuschneidbar, flexibel und leicht anadaptierbar. Diese spezielle Membran wird aus reinem Schweinekollagen (Typ I und III) gewonnen, ist extrem biokompatibel und resorbiert vollständig. Somit ist **EZ Cure™** eine effektive Barriere für eine optimierte Weichgewebsheilung.

Die **EZ Cure™** Kollagenmembran kann bei dicht verschlossener Verpackung und Raumtemperatur 3 Jahre aufbewahrt werden.

Erhältlich in folgenden Größen:

15 x 25 mm / 20 x 30 mm / 30 x 40 mm

Alle **EZ Cure™**-Membranen werden doppelt steril verpackt geliefert.

Indikationen:

- Schutz von Knochendefekten nach augmentativen Maßnahmen
- Schutz von periimplantären und parodontalen Defekten

▶ ▶ ▶ [Membrangrößen, Preise und Bestellformular auf der Rückseite](#)

Besuchen Sie unseren Webshop unter: www.imperios.de



Verarbeitung: Für eine optimale Handhabung sollte die **EZ Cure™**-Membran vor dem Gebrauch mit steriler Kochsalzlösung für ca. ein bis zwei Minuten befeuchtet werden. Anschließend kann die Membran an den gewünschten Bereich appliziert werden. Um eventuelle Mikrobewegungen zu vermeiden, sollte die Membran mit resorbierbaren Pins oder Titan-Pins fixiert werden. Zudem sollte die Membran bzw. das augmentierte Areal mit entsprechender Naht speicheldicht und spannungsfrei verschlossen werden, um etwaige Risiken einer bakteriellen Kontamination zu vermeiden. Eine offene Einheilung wird bei Verwendung der **EZ Cure™**-Membran nicht empfohlen.



◀Abb. 1: Oberflächenvergrößerung mit Rasterelektronenmikroskop



EZ Cure Membranen werden teilweise in „Easy Flex“-Verpackung geliefert



Hier gelangen Sie direkt zu **EZ Cure™** im Webshop mit weiteren Produktinformationen

Bestellformular

Lieferung ab 199,-* Bestellwert
VERSANDKOSTENFREI

Bitte ankreuzen, ausfüllen und per Fax (+49 6172/925 81 57), Hotline (0800 6646936) oder E-Mail (bestellung@imperios.de, z.B. Foto des ausgefüllten Formulars) bestellen:

Artikel - Beschreibung	Größe	Inhalt/Pack	Artikel-Nr.	Preis/Pack	Bestellmenge
EZ Cure™ Membran	15 x 25 mm	2x Membran	EZ-02-1525	149,00 €*	
EZ Cure™ Membran	20 x 30 mm	1x Membran	EZ-01-2030	119,00 €*	
EZ Cure™ Membran	30 x 40 mm	1x Membran	EZ-01-3040	145,00 €*	

Hiermit bestelle ich verbindlich die in der Tabelle markierten Artikel:

Praxis _____

Praxisstempel:

Unterschrift _____

imperios GmbH
Goebenstraße 10-12
50672 Köln
Tel.: +49 6172/92 58 51

info@imperios.de
www.imperios.de

Hotline: 0800 6646936**

**kostenlos aus dem deutschen Festnetz.

* Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt. und ggf. Versand. Die Angebote sind gültig bis zum 30.09.2026. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Ab einem Bestellwert von 199,- €* erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Aktuelle Preise entnehmen Sie immer dem Webshop. Bitte beachten Sie die jeweilige Gebrauchsanweisung zum Artikel. Dieser Produktflyer ersetzt diese nicht und dient lediglich der Vorabinformation.