


## In'Oss™ Putty – modellierbares, vollsynthetisches Knochenersatzmaterial

**Umseitig finden Sie eine Auswahl an Verpackungseinheiten von In'Oss™ Putty Knochenersatzmaterial mit Preisangaben sowie unser Bestellfax:** Einfach ausfüllen und an uns zurückfaxen!

## In'Oss™ Putty – gebrauchsfertig, direkt aus der Spritze

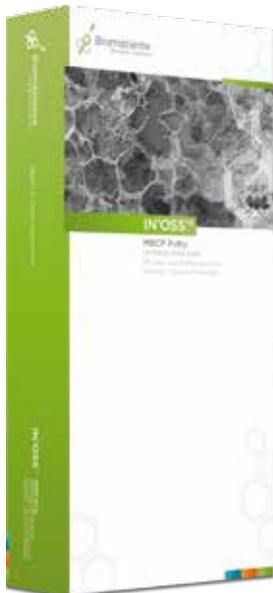

**In'Oss™** ist eine mikroporöse, resorbierbare, zweiphasige Calcium-Phosphat-Emulsion, aufbauend auf der bekannten MBCP™ Technologie. Entwickelt wurde dieses außergewöhnliche Knochenersatzmaterial, um die klinische Handhabung während eines operativen Augmentationseingriffs zu erleichtern: **In'Oss™** passt sich an die Defektgeometrie an und bleibt volumenstabil.

**In'Oss™** verfügt über ein ausbalanciertes Verhältnis zwischen MBCP™ Mikro-Partikeln und einem resorbierbaren Hydrogel, welches als Träger fungiert und ein schnelles Knochenwachstum begünstigt. Das Material resorbiert stufenweise und wird durch neuen, vitalen Knochen ersetzt.

**In'Oss™** ist gebrauchsfertig und kann direkt aus der Spritze in den Knochendefekt appliziert werden.

**Verpackungseinheit:** 2 x 0,5 ml in Spritzen

### Produkteigenschaften:

- Formbar: lässt sich sehr gut an die Defektgeometrie anpassen
- Vollständig resorbierbar
- Wird direkt aus der Spritze appliziert – kein vorheriges Anmischen notwendig
- Osteokonditiv
- Mikropartikelgröße: 8-200 µm
- vollsynthetisch
- Doppelt steril verpackt

### Indikationen:

- Sinuslift/Sinusbodenelevation
- Auffüllen von Extraktionsalveolen/Socketpreservation
- Auffüllen von periimplantären und parodontalen Defekten



▶▶▶ Preise und Verpackungseinheiten auf der Rückseite

**Anwendungshinweise:**

In'Oss™ ist doppelt steril verpackt. Öffnen Sie die Blisterverpackung und entnehmen die enthaltene Spritze.

In'Oss™ kann direkt auf der Spritze appliziert werden – ein vorheriges Anmischen ist nicht notwendig. Wenn gewünscht kann In'Oss™ mit autologem Knochen gemischt werden.

Es wird empfohlen, nach Einbringen des Materials den Defekt entweder mit einer Membran oder – wenn ausreichend vorhanden – der Mukosa abzudecken und speicheldicht zu vernähen.



▲ Abb. 1: Applikation von In'Oss™ direkt aus der Spritze



Hier gelangen Sie direkt zu In'Oss™ Putty im Webshop mit weiteren Produktinformationen



## Bestellfax

Lieferung ab 199,-\* Bestellwert  
**VERSANDKOSTENFREI**

Bitte ankreuzen, ausfüllen und per Fax an: +49 6172 / 925 81 57

Artikel - Beschreibung	Inhalt/Pack	Artikel-Nr.	Preis	Bestellmenge
In'Oss™ Putty modellierbare Paste in Spritzen	2x 0,5 ml	MP-01-0510	139,00 €* 139,00 €*	

Hiermit bestelle ich verbindlich die in der Tabelle markierten Artikel:

Praxis \_\_\_\_\_

Praxisstempel:

Unterschrift \_\_\_\_\_

imperiOs

imperiOs GmbH  
Hessenring 119-121  
61348 Bad Homburg  
Tel.: +49 6172/92 58 51

info@imperios.de  
www.imperios-dental.de

**Hotline: 0800 6646936\*\***

\*\*kostenlos aus dem deutschen Festnetz.

\* Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt. und ggf. Versand.  
Die Angebote sind gültig bis zum 31.12.2020. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Ab einem Bestellwert von 199,- €\* erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.