


## Hyaloss® matrix, die bioaktive Hyaloronmatrix

Umseitig finden Sie Preisangaben zu Hyaloss® matrix sowie unser Bestellfax:

Einfach ausfüllen und an uns zurückfaxen!

## Hyaloss® matrix – die bioaktive Hyaloronmatrix für regenerative Knochen- und Weichgewebstherapie

**Hyaloss® matrix** ist eine bioaktive und resorbierbare Matrix, die sich aus Fasern der Hyaluronsäure zusammensetzt. Sobald sie mit Flüssigkeit in Berührung gerät, wird sie gelförmig und sondert schrittweise Hyaluronsäure ab. Dadurch erschafft sie ein Mikro-Milieu, das die Aktivierung und Stimulation von Fibroblasten, Endothelzellen und Osteoprogenitorzellen ermöglicht.

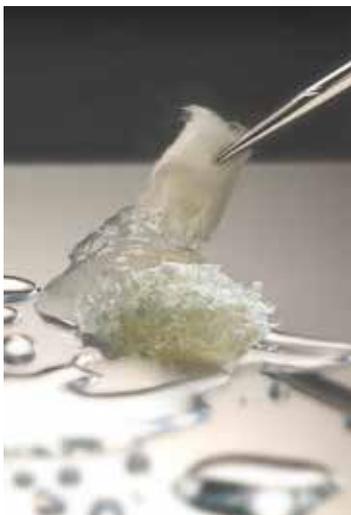

Die **Hyaloss® matrix** wirkt in der wichtigsten Heilungsphase des Defekts, nämlich innerhalb der ersten 10 Tage nach dem Eingriff, und setzt dabei reine Hyaloron-säure frei.

Durch den erwiesenermaßen positiven Effekt von Hyaluronsäure auf Angiogenese und mesenchymale Stammzellen beschleunigt die Hyaloron-Matrix den Heilungsprozess und begünstigt die Entstehung natürlichen, strukturierten und bestmöglich vaskularisierten Gewebes.

Ausführliche Informationen und Produktbroschüre unter: [www.imperios.de](http://www.imperios.de)



### Produkteigenschaften:

- modellierbar – gelartige Konsistenz
- versiegelnd – schützt das Granulat vor Erschütterung
- unterstützt die Ansiedlung von Zellen
- stimuliert die Neo-Angiogenese
- beschleunigt den Heilungsprozess
- ready-to-use – Lagerung bei Raumtemperatur
- kosteneffizient

### Indikationen:

- Zum Beimischen zu autologen Knochenspänen und partikulärem Knochenersatzmaterial
- Zum Auffüllen von kleinen Paro-Defekten kann die **Hyaloss® matrix** auch unvermischt appliziert werden



▶▶▶ Preise und Bestellfax auf der Rückseite

**Anwendung von Hyaloss® matrix:**

Sobald gelartig und mit Knochen bzw. Knochenersatzmaterial vermischt, lässt sich die Matrix leicht in jede Art von Defekt einbringen und unterstützt den regenerativen Prozess.

**Hyaloss® matrix** passt sich perfekt an jede Art Knochendefekt an und ermöglicht höchste Flexibilität, da sich die Dichte des Gels je nach Menge der zugefügten Flüssigkeit variieren lässt.

**Hyaloss® matrix** schützt die Granulatkörner vor Erschütterung oder Verschiebung und erlaubt so eine schnellere und sauberere chirurgische Behandlung.

**Hyaloss® matrix** kann bei Raumtemperatur gelagert und sofort verwendet werden.



◀ **Abb. 1:** Jede Packung enthält vier Bündel sterile Fasern á 0,5 ml. Mischen Sie die **Hyaloss® matrix** mit autologen Knochen-spänen oder anderem Knochenersatz-material in einem Verhältnis von 1:3.



◀ **Abb. 3:** Benetzen Sie die Fasern mit steriler Kochsalzlösung bzw. Patientenblut und mischen Sie die Knochenersatzpartikel unter, um eine homogene, gelartige Paste zu erhalten.



◀ **Abb. 2:** Beseitigen Sie überschüssige Flüssigkeit mit sterilem Verbandsmüll, um die gewünschte Konsistenz zu erhalten und platzieren Sie die **Hyaloss® matrix** am Empfängerareal. Modellieren Sie das Gel nach Belieben mit einem sterilen Spatel.



Hier gelangen Sie direkt zu **Hyaloss® matrix** im Webshop mit weiteren Produktinformationen und Produktbroschüre

**Bestellfax**

Lieferung ab 199,-\* Bestellwert  
**VERSANDKOSTENFREI**

Bitte ankreuzen, ausfüllen und per Fax an: +49 6172 / 925 81 57

Artikel - Beschreibung	Einheit	Inhalt	Artikel-Nr.	Preis	Bestellmenge
Hyaloss® matrix	0,5 ml	4x 0,5 ml	HM-04-0505	159,00 €* 159,00 €*	

Hiermit bestelle ich verbindlich die in der Tabelle markierten Artikel:

Praxis \_\_\_\_\_

Praxisstempel:

Unterschrift \_\_\_\_\_



imperiOs GmbH  
Hessenring 119-121  
61348 Bad Homburg  
Tel.: +49 6172/92 58 51

info@imperios.de  
www.imperios-dental.de

**Hotline: 0800 6646936\*\***

\*\*kostenlos aus dem deutschen Festnetz.

\* Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt. und ggf. Versand.  
Die Angebote sind gültig bis zum 31.12.2020. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Ab einem Bestellwert von 199,- €\* erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.